


フィビュラプレート手技書


プレート 厚さ 1.0mm 左右 5 サイズ (3H~8H) 計 10 枚 CPチタン製

コーティカルスクリュー 3.5mm 10~30mm (2mm 刻み) キャンセラススクリュー 3.5mm 10~24mm (2mm 刻み)

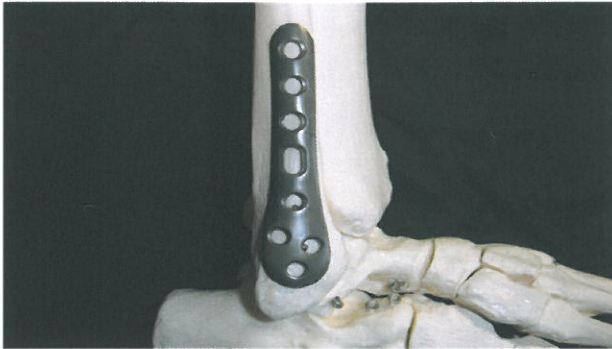

1. プレート設置


このプレートは、腓骨遠位末梢まで覆うプレートではありません。腓骨の稜線に合わせて、フィットする位置をご確認下さい。

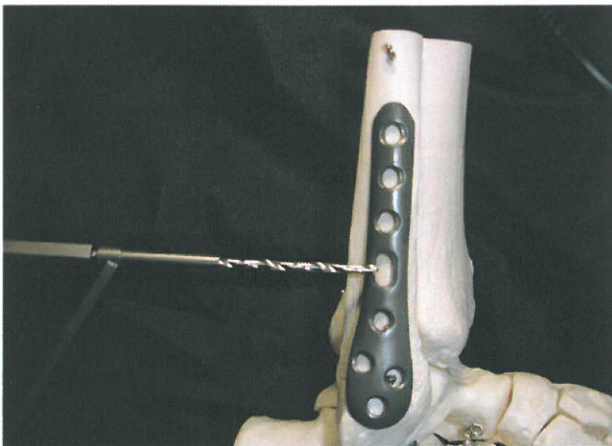

2. ドリリング (コーティカル・キャンセラス)


2.5mm ドリルとドリルガイド(**2.5mm** 用穴) を使用し穴あけを行ってください。中央の楕円穴に第一スクリューを入れて頂くと、プレート位置の微調整が可能になります。

注) ラグスクリューとして使用する際には 3.5mm ドリルを使用して下さい。

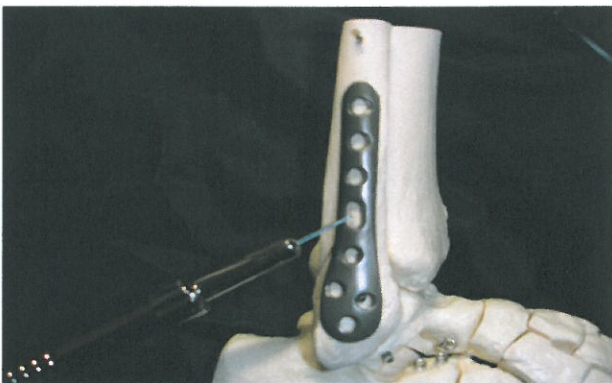


3. デプスゲージ

コーティカルスクリューは計測値より、**±0mm**、キャンセラススクリューは計測値より **-2mm** のサイズを推奨いたします。

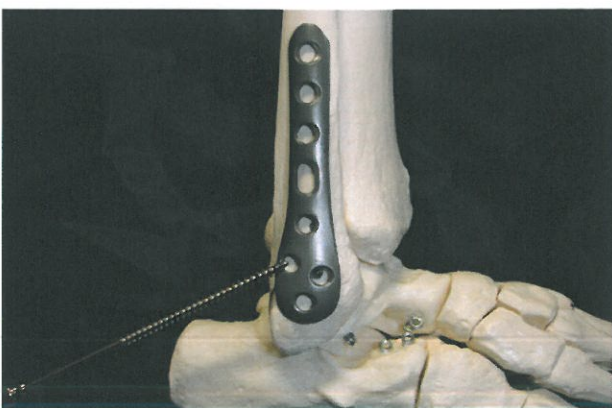

4. タッピング

コーティカルスクリューは、セルフタップですが、キャンセラススクリューはプレタップですので、通常通りタッピングをしてください。

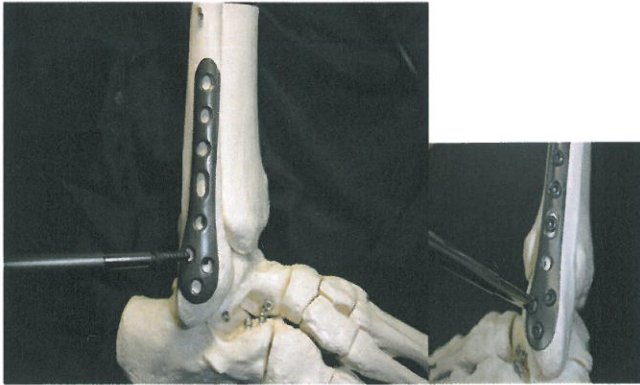

5、スクリュー挿入

全てのスクリューを少し緩めに
締めておき、最後にしっかりと
締めてください。その際、スクリューの端が
プレートに接触しないよう、ご注意ください
い。

※ 3.5 mmドリルはラグをかける際に、ご使用ください。

標準器械セット

